

Masque respiratoire FFP2 plié sans valve (x 50)



Caractéristiques

Désignation : *Masque respiratoire FFP2 plié sans valve (x 50)*
Conditionnement : 50

Normes

> EN149

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Masque de protection respiratoire FFP2.

■ Détails techniques

Tissu soufflé fondu non tissé et plié modèle KN95.

Barrette nasale.

Deux élastiques pour maintien derrière l'oreille.

Hypoallergénique.

Efficacité de filtration > 94 % des aérosols.

Fuite totale vers l'intérieur < 8 %.

■ Conseils

Pour vérifier l'étanchéité, placer les deux mains en forme de coquille sur le masque sans le bouger et expirer fortement. Si de l'air fuit, ajuster soit la barrette, soit les élastiques ou bien repositionner le masque.

Le masque est à usage unique.

Sa durée de protection peut aller jusqu'à huit heures successives.

■ Application(s)

Protection contre la pénétration et la projection de particules solides et liquides.

■ Mode d'utilisation

1. Extraire et appliquer le masque en le tenant uniquement par les élastiques.
2. Respecter le sens de pose avec la barrette en haut au niveau du nez.
3. Positionner les élastiques derrière les oreilles.
4. Le masque doit être bien déplié. Couvrir le nez, la bouche et le menton.
5. Une fois placé, ne plus le toucher ni le repositionner jusqu'au retrait.
6. Après retrait, jeter le masque et se laver les mains.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Boîte carton plein

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 13.5
Profondeur (cm) : 13.5
Poids net (kg) : 0.3
Poids brut (kg) : 0.4



■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 36.2
Longueur (cm) : 53.2
Profondeur (cm) : 41.1
Poids net (kg) : 16
Poids brut (kg) : 20

